

# GlucoMen® areo – Kratko uputstvo za upotrebu

Kako da vršite merenje koncentracije šećera u krvi

1



Novu traku za testiranje GlucoMen® areo stavite gore u aparat za merenje.

2



Uzmite jednu kap krvi.

3



Nanesite jednu kap krvi na kraj trake za testiranje.

4



Posle 5 sekundi pojaviće se rezultat merenja.

5



Pritisnite taster za izbacivanje, da biste higijenski odstranili traku za testiranje.



 Division der  
**BERLIN-CHEMIE**  
ALMENARINI  
diagnostica

Da li imate pitanja ili predloge? Mi smo za Vas veoma rado tu!  
Besplatni servis-telefon +49 - 800 - 45826636  
(od ponedeljka do četvrtka od 8 do 18 časova, petkom od 8 do 16 časova)  
[www.glucomenareo.de](http://www.glucomenareo.de) | [glucomen@berlin-chemie.de](mailto:glucomen@berlin-chemie.de)

**GlucoMen®**  
**areo**

Jednostavno lako meriti

# GlucoMen® areo informacije na ekranu

## Saopštenje

## Šta znači informacija?

## Šta moram da radim?



Greška hardver sistema

Obratite se našem servisu  
Telefon: +49 - 800 - 45 82 66 36  
(besplatno)



Traka za testiranje je korišćena ili je oštećena

Koristite novu traku za testiranje



Greške uzorka krvi

Na novu traku za testiranje  
nanesite više krvi



Traka za testiranje je bila prerano odstranjena

Ponovite merenje sa novom trakom za testiranje.



NFC-veza prekinuta

Ponovite prenos podataka

