

GlucoMen® areo: краткая инструкция по эксплуатации

Как измерить уровень сахара в крови:

1



Введите новую тест-полоску GlucoMen® areo в глюкометр сверху.

2



Возьмите каплю крови для анализа.

3



Нанесите каплю крови на конец тест-полоски.

4



Спустя 5 секунд на экран будет выведен результат замера.

5



Нажмите клавишу выброса, чтобы стерильно удалить тест-полоску.



 Division der
BERLIN-CHEMIE
A. MENARINI
diagnostica

У вас возникли вопросы или пожелания? Мы к вашим услугам!
Бесплатная справочная линия +49 - 800 - 45826636
(пн - чт 8:00 – 18:00, пт 8:00 – 16:00)
www.glucomenareo.de | glucomen@berlin-chemie.de

GlucoMen®
areo

Замер сахара в крови – это просто

GlucoMen® areo – сигналы дисплея

Сигнал	Значение	Ваши действия
	Ошибка системной программы	Обратитесь в отдел обслуживания клиентов по тел. +49 - 800 - 45 82 66 36 (бесплатный)
	Тест-полоска повреждена или уже использовалась	Повторите тест, используя новую тест-полоску
	Ошибка пробы крови	Повторите тест, нанеся на новую тест-полоску чуть больше крови
	Тест-полоска была удалена слишком рано	Повторите тест, используя новую тест-полоску
	Ближняя бесконтактная связь (NFC) была прервана	Повторите передачу данных

