



Finnisch

GLUCOMEN® AREO PIKA-ALOITUSOPAS

1



Aseta uusi GlucoMen® areo -koeliuska mittarin yläosan aukkoon.

2



Ota verinäyte.

3



Aseta pisara verta koeliuskan päähän.

4



Mittaustulos ilmestyy näytölle 5 sekunnin kuluttua.

5



Paina vapautuspainiketta ja poista koeliuska hygieenisesti.




GLUCOMEN® AREO NÄYTÖN ILMOITUKSET

Ilmoitus

Mitä se tarkoittaa?

Miten toimia?

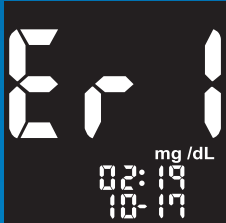

Laitteistovirhe

Ota yhteyttä asiakas-palveluumme



Koeliuska on vahingoittunut
tai likainen

Käytä uutta koeliuskaa




Verinäytevirhe

Aseta uuteen koeliuskaan
enemmän verta



Koeliuska poistettu
liian aikaisin

Toista testi uudella koeliuskalla

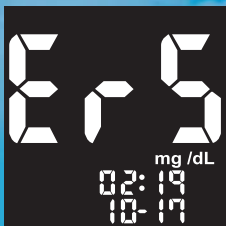

NFC-yhteys katkennut

Toista tiedonsiirto