


# EINFACHES DATENMANAGEMENT

Kinderleichte Übertragung der Blutzuckerwerte auf PC,  
Smartphone oder Tablet

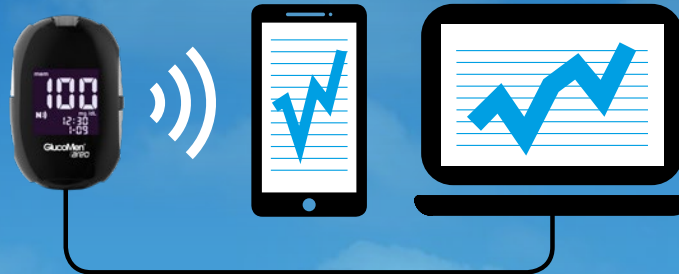

# Smartphone

Einfache Datenübertragung mit NFC

Für Android  
und iPhone



Weitere Informationen und Anleitungen unter  
[www.glucomenareo.de](http://www.glucomenareo.de)

Hinweis für Tablet Verwender: Die Übertragung  
ist auf Android Tablets möglich



## 3 einfache Schritte:


1

NFC beim GlucoMen® areo und auf  
dem Smartphone aktivieren



2

Eine der folgenden Apps down-  
loaden und öffnen

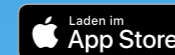

GlucoLog® Lite App: kostenlose App von  
A. MENARINI DIAGNOSTICS

3

GlucoMen® areo und Smartphone  
aneinanderhalten und Datenüber-  
tragung bestätigen



Hinweis: Bitte halten Sie den GlucoMen®  
areo an die Rückseite des Android Gerätes  
bzw. an die obere Kante des iPhones.

# Computer

Einfache Datenübertragung mit dem USB-Kabel und der GlucoLog® Software



Weitere Informationen und Anleitungen unter [www.glucomenareo.de](http://www.glucomenareo.de)




Datenübertragung durch Patienten

## 3 einfache Schritte:

1

Download GlucoLog® Software:  
[www.menariniagnostics.de](http://www.menariniagnostics.de)

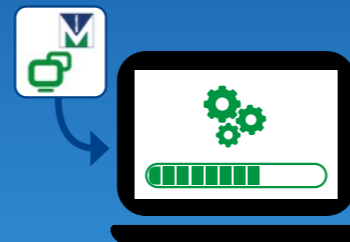

2

Programm starten und neuen Benutzer anlegen



3

GlucoMen® areo und Computer mit Datenkabel verbinden und Datenübertragung starten



# Computer

Einfache Datenübertragung mit dem USB-Kabel und der GlucoLog® Professional, Smart Pix® oder DIABASS® Software



Weitere Informationen und Anleitungen unter [www.glucomenareo.de](http://www.glucomenareo.de)



Datenübertragung in der Arztpraxis

## 3 einfache Schritte\*:

1

GlucoLog® Professional Software mit Bestellformular bestellen und erwerben



\* am Beispiel der Software GlucoLog® Professional von A. MENARINI DIAGNOSTICS

2

GlucoLog® Professional Software installieren, starten und neuen Benutzer anlegen



3

GlucoMen® areo und Computer mit Datenkabel verbinden und Datenübertragung in die Patientenakte starten



Mehr Informationen und Anleitungen unter  
[www.glucomenareo.de](http://www.glucomenareo.de)



Google Play ist eine Marke von Google LLC  
iPhone und App Store sind Marken der Apple Inc.

 **Division der  
BERLIN-CHEMIE**  
A.MENARINI  
diagnostics

**Kunden-Service Diabetes:** Telefon 0800 - 45826636 (kostenlos)  
[glucomen@berlin-chemie.de](mailto:glucomen@berlin-chemie.de) | [www.glucomenareo.de](http://www.glucomenareo.de)

**GlucoMen<sup>®</sup>**  
**AREO**

Einfach leicht messen.