



Serbisch

GLUCOMEN® AREO KRATKO UPUTSTVO ZA UPOTREBU

1



Novu traku za testiranje GlucoMen® areo stavite gore u aparat za merenje.

2



Uzmite jednu kap krvi.

3



Nanesite jednu kap krvi na kraj trake za testiranje.

4



Posle 5 sekundi pojaviće se rezultat merenj.

5



Pritisnite taster za izbacivanje, da biste higijenski odstranili traku za testiranje.




GLUCOMEN® AREO INFORMACIJE NA EKRA

Saopštenje

Šta znači infformacija?

Šta moram da radim?

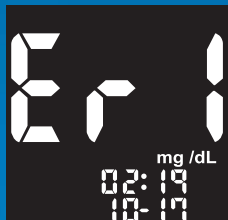

Greška hardver sistema

Obratite se našem servisu
Telefon: +49 -800 - 45 82 66 36
(besplatno)



Traka za testiranje je korišćena
ili je oštećena

Koristite novu traku za testiranje




Greške uzorka krvi

Na novu traku za testiranje
nanesite više krvi



Traka za testiranje je bila
prerano odstranjena

Ponovite merenje sa novom
trakom za testiranje

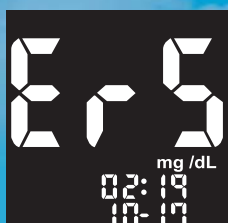

NFC-veza prekinuta

Ponovite prenos podataka