



Kurmandschi (Syrien)

RÊBERA DESTPÊKA BILEZ YA GLUCOMEN® AREO

1



Bandeke nû ya testa GlucoMen® areo bînin ser aliyê jorê yê amûra pîavanê.

2



Dilopek xwîn bînin.

3



Dilopeke xwînê li ser bandê daynîn.

4



Amûra pîvanê piştî 5 çirkeyan encamê nîşan dide.

5



Ji bo ku banda testê bi awayê hijîyenîk bê derxistin, pêl bişkoka derxistinê bikin.



PEYAMA NÎŞANDANÊ YA GLUCOMEN® AREO

Peyam

Wateya vê peyamê çi ye?

Divê ez çi bikim?



Çewtiya reqalavê

Bi tîma me ya xizmetê
re pewendiyê çêke



Banda testê xirab e

Bandeke testê ya nû bi kar bîne



Çewtiya xwîna mînak

Zêdetir xwîn daynin ser şerîdeke nû



Banda testê pir zû hat rakirin

Testê bi bandeke nû dîsa çêkin



Girêdana NFC qut bû

Ragihandinê dubare bikin