



Türkisch

# GLUCOMEN® AREO 0 KISA KULLANIM KILAVUZU

1



Yeni bir GlucoMen® areo test çubuğunu ölçüm cihazının üst kısmına yerleştirin.

2



Bir kan damlası alın.

3



Test çubuğunun ucuna kan damlasını uygulayın.

4



Ölçüm sonucu 5 saniye sonra gözükmetedir.

5



Kullanılan test çubuğunu hijyenik bir şekilde çıkarmak için çıkarma düğmesini kullanın.



# GLUCOMEN® AREO EKRAN MESAJLARI

Mesaj

Mesaj ne anlama geliyor?

Ne yapmam gerekiyor?



Sistem donanım hatası

Müşteri hizmet ekibimize başvurun  
Telefon: +49 -800 - 45 82 66 36  
(ücretsiz)



Test çubuğu daha önce kullanılmış veya hasarlı

Yeni bir test çubuğu kullanın



Kan örneğinde hata

Yeni bir test çubuğuna daha fazla kan uygulayın



Test çubuğu erken çıkarıldı

Ölçümü yeni bir test çubuğu ile tekrarlayın



NFC bağlantısı kesildi

Veri aktarımını tekrarlayın