

GlucoMen® areo Kurzbedienungsanleitung

Wie Sie eine Blutzuckermessung durchführen

1



Führen Sie einen neuen GlucoMen® areo Teststreifen oben in das Messgerät ein.

2



Gewinnen Sie einen Blutstropfen.

3



Tragen Sie einen Blutstropfen auf das Ende des Teststreifens auf.

4



Nach 5 Sekunden erscheint das Messergebnis.

5



Verwenden Sie die Auswurf-taste, um den verwendeten Teststreifen hygienisch zu entfernen.



GlucoMen® areo Displaymeldungen

Meldung

Was bedeutet die Meldung?

Was muss ich tun?



Hardwarefehler

Wenden Sie sich an unser Serviceteam
Telefon: 0800-45 82 66 36
(kostenlos)



Teststreifen benutzt oder beschädigt

Verwenden Sie einen neuen Teststreifen



Blutprobenfehler

Auf einen neuen Teststreifen mehr Blut auftragen



Teststreifen zu früh entfernt

Messung mit einem neuen Teststreifen wiederholen



NFC Verbindung unterbrochen

Datenübertragung wiederholen



M093571